

# MICROCELL

Camomila e Malva Micro-Enema de Glicerol 9g - **ADULTO**  
Camomila e Malva Micro-Enema de Glicerol 3g - **CRIANÇA**

## COMPOSIÇÃO:

Cada dose contém: glicerol, amido de trigo, extrato líquido de malva, extrato líquido de camomila e água purificada.

## MECANISMO DE AÇÃO:

Solta e lubrifica as fezes, facilitando a sua evacuação através de uma ação de amolecimento.

## CONTRA-INDICAÇÕES:

Os micro-enemas não devem ser utilizados para tratar a dor abdominal aguda, ou qualquer dor de origem desconhecida.

## EFEITOS SECUNDÁRIOS:

Em casos de doentes com elevada sensibilidade aos ingredientes, ou que anteriormente sofreram de inflamação das membranas mucosas, podem sentir irritações na mucosa retal.

## DOSAGEM:

1 ou 2 micro-enemas por cada período de 24 horas.

## COMO USAR:

Cada micro-enema de Microcell permanece individualmente selado até ao momento de utilização, garantindo a higiene e uma utilização prática do produto. Para abrir o Microcell, agarre na cânula e rode a tampa para a remover. Ao manusear, não agarre o Microcell pelo recipiente compressível, caso contrário o líquido pode derramar-se ao remover a tampa. Lubrifique o bucal espremendo uma gota de líquido, de seguida insira o bucal no reto e comprima o recipiente. Remova o bucal sem libertar a pressão do recipiente e descarte o Microcell.

## Dispositivo médico - Ler cuidadosamente a rotulagem e as instruções de utilização.

Os micro-enemas Microcell devem ser armazenados num local seco, a uma temperatura compreendida entre 4 e 25 °C.

## MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS



ATENÇÃO-CONSULTAR  
AS INSTRUÇÕES ANTES  
DE USAR



CONSERVAR ENTRE OS  
4 E OS 25 °C



CÓDIGO DE LOTE



DEITAR FORA AS  
EMBALAGENS NO LIXO



NÃO REUTILIZAR



FABRICANTE



UTILIZAR ATÉ



NÚMERO DE REFERÊNCIA



PHARMA 30 S.r.l.  
Via Bernardi, 1 - 35030  
Rubano (PD)-Italia

Distribuído  
em Portugal por:  
CPCH

Rua dos Bem  
Lembrados, 141  
2645-471  
ALCABIDECHE

Tel.: 214 449 630

